



NexxZr®+ Multi 2.0

Doğal estetik.
Etkili işlem.

Dođal estetik.
Etkili iřlem.

NexxZr[®]+ Multi 2.0



NexxZr[®]+ Multi 2.0, son derece estetik NexxZr[®]+ Multi'nin geliřtirilmiř formülasyona sahip bir sonraki versiyonudur.

NexxZr[®]+ Multi 2.0, dođal renkli ve iřık geirgenliđi geiřli ve ysek eđilme kuvvetine (850 MPa servikal, 650 MPa insizal) sahip, diř hekimliđine uygun bir ok katmanlı zirkonyum oksittir (4Y-TZP servikal, 5Y-TZP insizal). Bu zellikler, anterior ve posterior blgede son derece estetik, monolitik, tek diř ve kpr restorasyonlarının oluřturabilmesini sađlamaktadır. zel olarak dzenlenen iřık geirgenliđi geiři, servikal alanda iyi kapsam ve insizal alanda daha ysek iřık geirgenliđi sađlar. Entegre renk geiři, dođal grnml restorasyonların etkili bir biimde oluřturulabilmesini sađlar.

Teknik veriler



Tip
5Y-TZP (insizal)
4Y-TZP (servikal)



Eđilme kuvveti
650 MPa (insizal)
850 MPa (servikal)



Iřık Geirgenliđi
%49 (insizal)
%45 (servikal)



Endikasyon
Tek birimli
restorasyonlar ve
3 birimli kprler



Iřleme teknikleri
İnfiltrasyon tekniđi
Renklendirme tekniđi
Cut-back tekniđi

1

Doğal renk geçişi

Etkili bir şekilde doğal görünümlü restorasyonlar oluşturma



650 MPa
%49 Işık Geçirgenliği

Multi

850 MPa
%45 Işık Geçirgenliği



Yüksek ışık geçirgenliği

Doğal renk ve ışık geçirgenliği geçişi

2

Özel olarak düzenlenen ışık geçirgenliği geçişi

Servikal alanda iyi kapsam ve insizal alanda daha yüksek ışık geçirgenliği



Gerçeğe uygun ışık geçirgenliği geçişi



Gerçekçi estetik



Servikal alanda iyi kapsam

3


Yüksek eğilme kuvveti

3 birimli köprülere kadar tek birimli restorasyonlar



Bireysel olanaklar


Çok katmanlı konsept

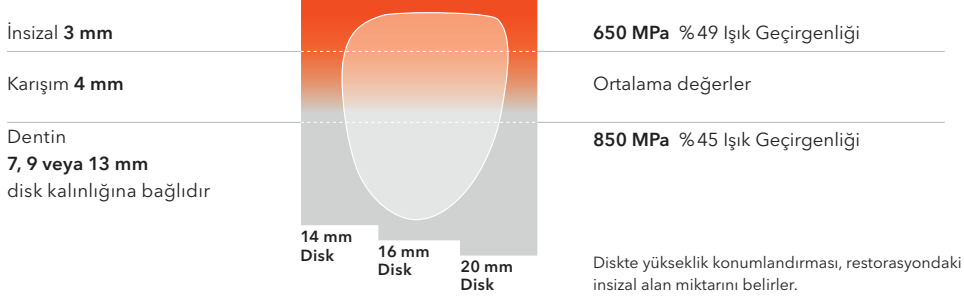

Renk kıvamı



Sinterleme programı

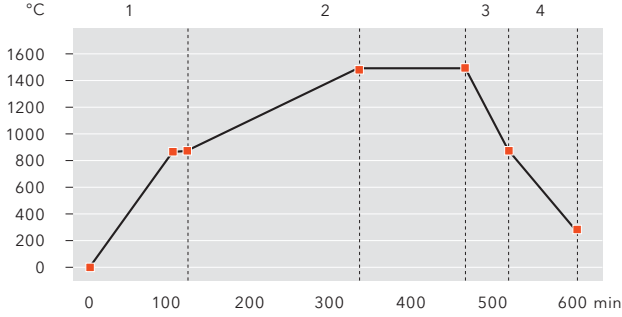

Faz	Sıcaklık °C	Isıtma / Soğutma oranı °C/min.	Bekletme süresi min.
1	20 - 900	10	30
2	900 - 1500	3,3	120
3	1500 - 900	10	-
4	900 - 300	8,3	-



Daha ayrıntılı bilgi için lütfen NexxZr kullanım talimatlarına başvurun.



sagemax.com/eifu

Teslimat formları

Geometri
W-98

Kalınlıklar
14, 16, 20 mm

Renkler
BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com