

sagemax.com

sagemax®




Sagemax experience

NexxZr T Multi
infiltrato
by Andrea Dalla Costa

NexxZr T Multi infiltrato
by Andrea Dalla Costa

Sagemax experience

Sequenza di lavoro

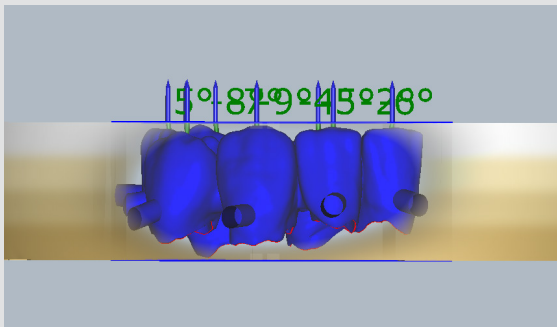

Posizionamento nel disco.



Elementi fresati con NexxZr T Multi A3.



Separazione e sgrossatura della superficie.



Texture individualizzata.

Infiltrazione



Leggera intensificazione dell'area marginale con NexxZr T liquid colore A2.



Armonizzazione dell' area di transizione tra smalto e dentina con il liquido ad effetto Incisal enhancer.




Leggero aumento cromatico nell'area incisale con NexxZr Liquid colore A1.



Disegno dei mammelloni con NexxZr Effect colore brown.



Colorazione del margine incisale con NexxZr Effect colore Grey.

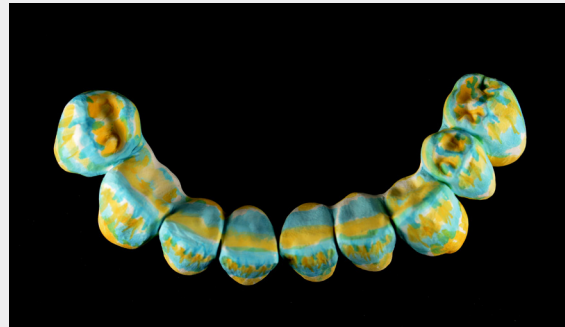

Infiltrazione completata.

Finalizzazione



Effetto estetico dopo la sinterizzazione.



Glasura con NexxZr Glaze Spray.



Lucidatura di superficie uniforme ed omogenea su tutta la struttura.



Corrispondenza colore ottimale con la scala colori A-D.

Risultato finale



Struttura post cementazione.




Eccellente integrazione nel cavo orale.

Dental designer



Andrea Dalla Costa
Dental Technician, Italy

 Andrea Dalla Costa

Contact us
info@sagemax.com

sagemax.com

Follow us
@sagemax.official

