

sagemax.com

sagemax®



Sagemax experience

PressCeramic
cut-back
by Florin Sabău

PressCeramic cut-back
by Florin Sabău

Sagemax experience

Situația inițială și situația cu dinții preparați



Dinți decolorați și obturații din compozit.




Situația cu prepararea finală a dinților 12, 11, 21, 22.

Proiectarea și realizarea structurii



Modelul de gips.

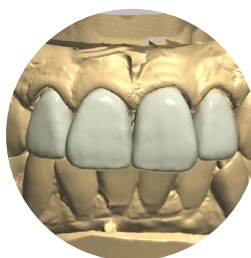

Proiectarea și alegerea culorii materialului pentru structură.




Coroanele presate din PressCeramic MT B1.




Cheie palatinală din silicon.

Coroane reduse vestibular și arderea de wash

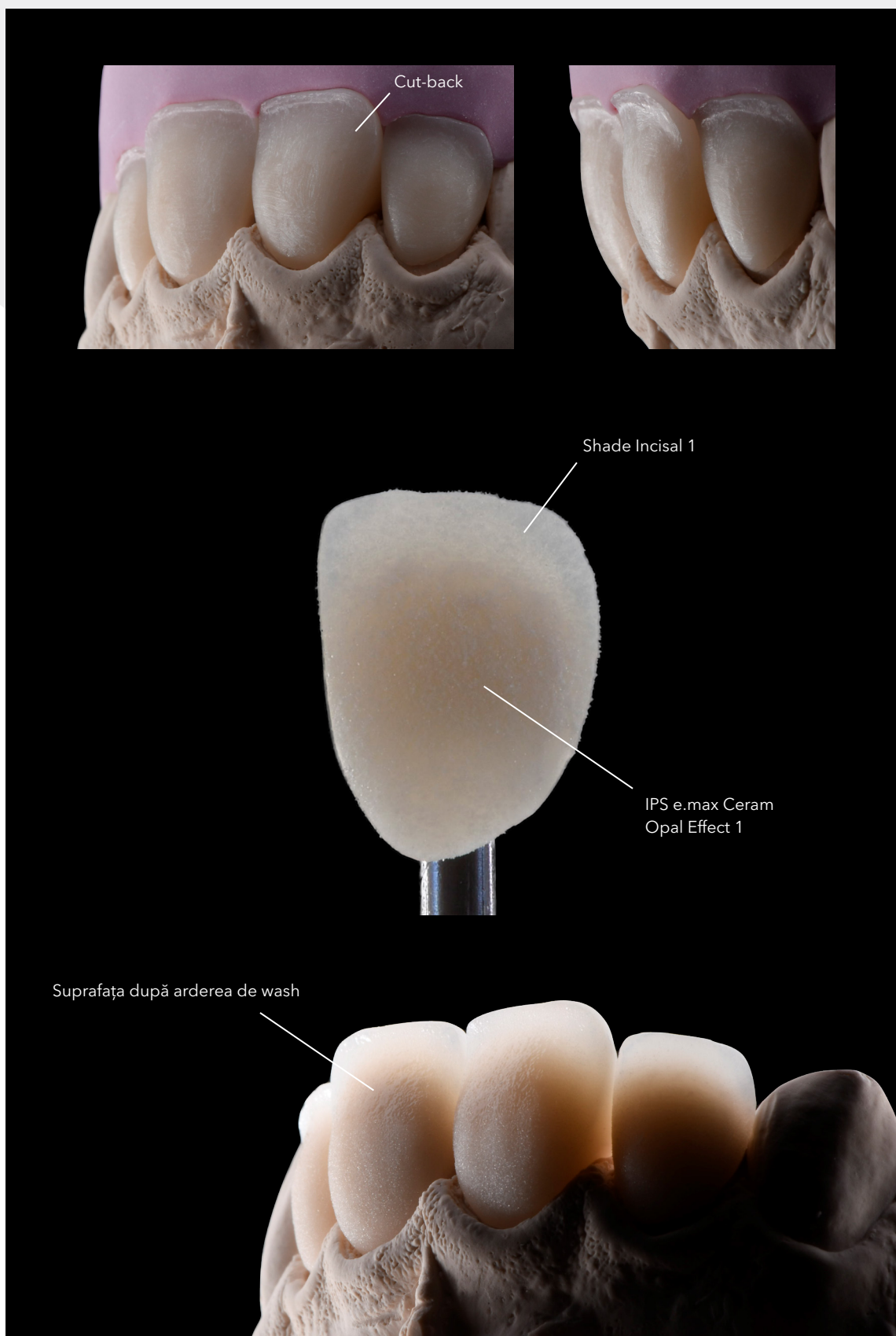


Structura coroanelor caracterizată în zonele incizale, meziale și distale cu IPS Ivocolor Shade Incisal 1 (Co. Ivoclar) și cu IPS e.max Ceram Opal Effect 1 (Co. Ivoclar) presărat deasupra înainte de ardere.

Microstratificare și textura de suprafață

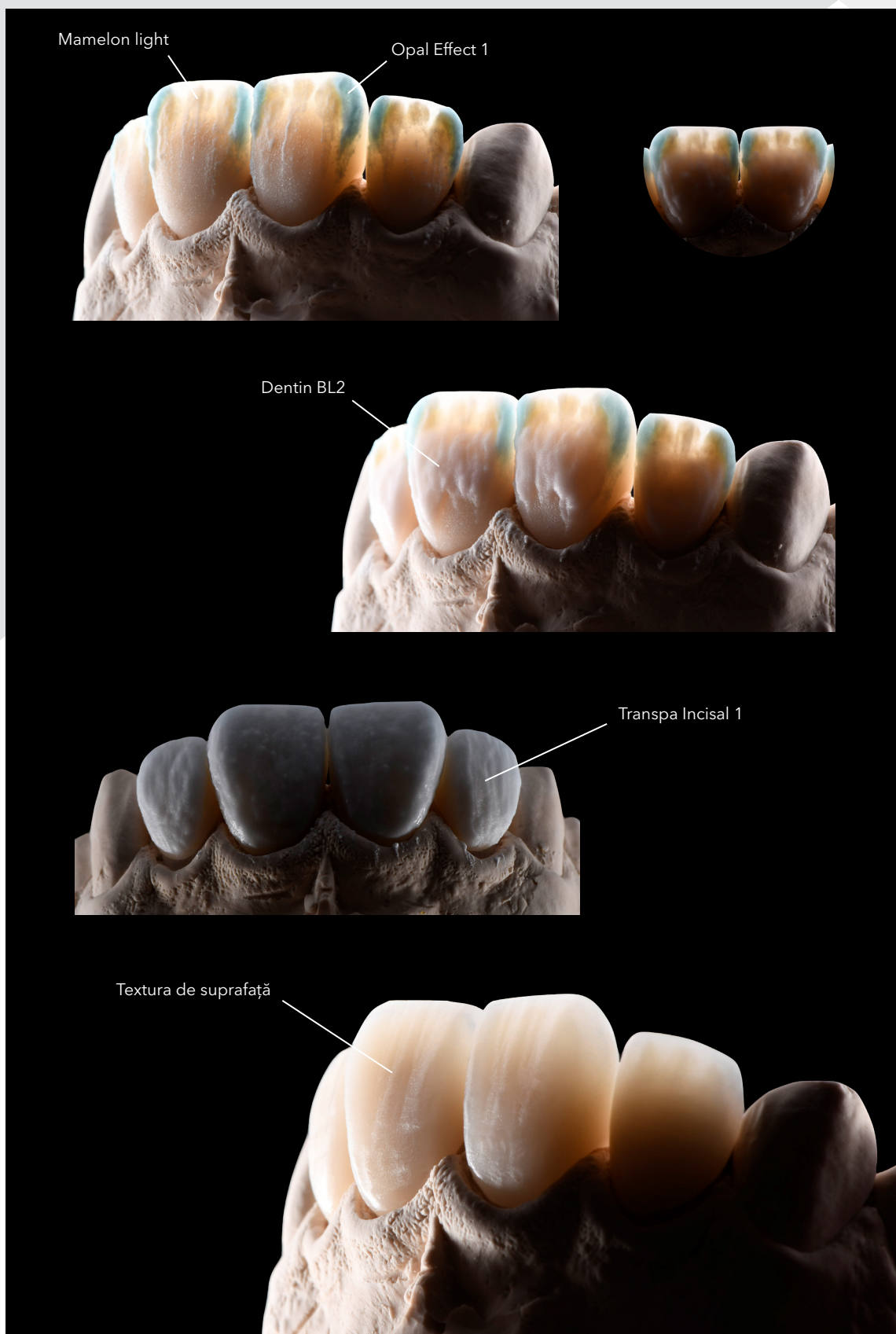

Stratificarea cu masele ceramice IPS e.max Ceram Opal Effect 1 și IPS e.max Ceram Mamelon Light în zona incizală pentru un aspect natural. Forma dintelui a fost finalizată cu IPS e.max Ceram Transpa Incisal 1.

Glazură și finisare

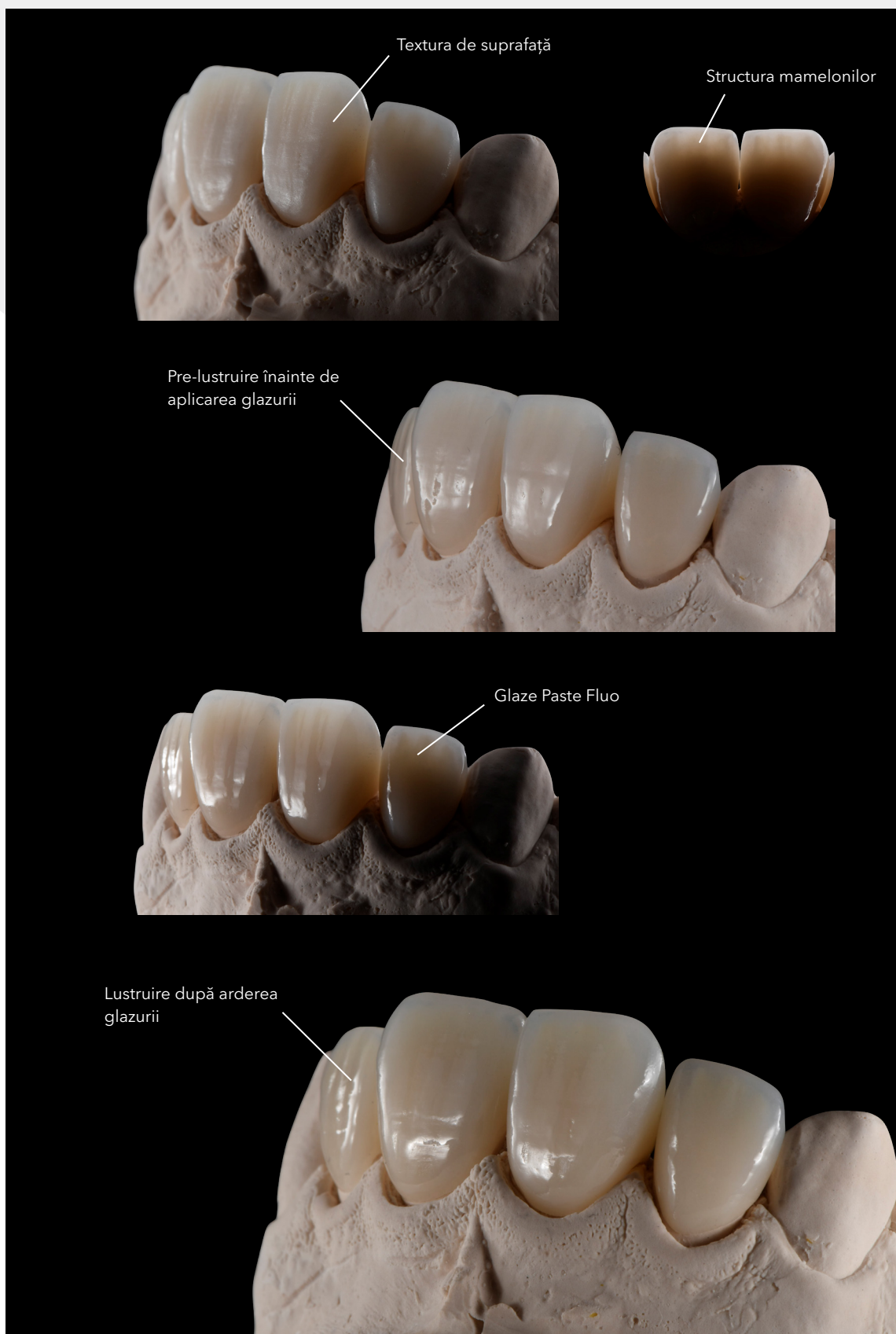

Suprafața coroanelor este pre-lustruită, urmată de glazurare cu IPS Ivocolor Glaze Paste Fluo. În final, suprafețele se dau un luciu natural prin lustruire mecanică.

Rezultatul final



Rezultatul final este cu adevărat impresionant: coroanele arată excepțional de natural și se integrează perfect în situația orală existentă. Pacientul a fost extrem de încântat de rezultat.



Dental designer

Florin Sabău
Dental Technician, Romania

📷 florinsabau_

Contact us
info@sagemax.com

sagemax.com

Follow us
[@sagemax.official](https://www.instagram.com/sagemax.official)

