

sagemax.com

sagemax®



Sagemax experience

---

PressCeramic  
mikro-geschichtet  
von Dominik Monreal



PressCeramic mikro-geschichtet  
von Dominik Monreal

# Sagemax experience

Ausgangssituation



Stark verfärbte und deformierte Frontzähne. Wunsch des Patienten: Maskierung der Frontzähne mit Kronen.



Nach der Kronenpräparation von Zahn 12 - 22.

Gerüsterstellung



Gipsmodell.




Wachskäppchen.




Vollanatomisches Wax-Up.



Mikro Cut-Back.

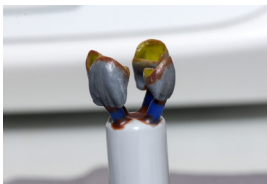

Angestiftete Kronen.

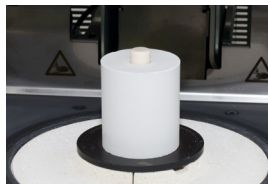

Pressung mit PressCeramic  
LT A3 Pellet.



Aufgepasste Krone.



Ausgearbeitete Kronen.

## Mikroschichtung

---



Wash-Brand mit Transpa clear, "Sprinkel-Technik".  
Verwendete Keramik: IPS e.max Ceram, Fa. Ivoclar.



Individualisierung mit Opal Effect 1, Dentin A3 und  
Mamelon light.



Schneideaufbau mit Transpa Incisal 2.



Ausarbeitung der Form und der Oberflächenstruktur.

## Fertigstellen

---



Bemalen und glasieren mit  
IPS Ivocolor, Co. Ivoclar.



Kronen nach dem  
Malfarben- und Glasur-  
brand.



Ätzen mit Flusssäure  
(HF-Gel).



Fertige Kronen, bereit zum  
zementieren.

## Endergebnis



Vorher.



Nachher.



Das Endergebnis fügt sich natürlich in die umgebende Mundhöhle ein.

### Dental designers



**Dominik Monreal**  
Dental Technician, Germany

📷 dominikmonreal8



**Kristina Günter**  
Dentist, Germany

[www.zahnarzt-kleve.de](http://www.zahnarzt-kleve.de)  
📘 Praxis für Zahnheilkunde Kristina Günter  
📷 zahnarzt\_kleve

Contact us  
[info@sagemax.com](mailto:info@sagemax.com)

[sagemax.com](http://sagemax.com)

Follow us  
[@sagemax.official](https://www.instagram.com/sagemax.official)

